

# CE EU-conformiteits- verklaring

## Elektro / Bedinterfaace


Wij,

Roessingh Dienstengroep B.V.  
h.o.d.n. rdgKompagne  
Roessinghsbleekweg 161  
7522 AH Enschede

verklaren dat geheel onder eigen verantwoordelijkheid deze Elektro toepassing type Interface (EI) in alle varianten met accessoires, waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met alle toepasselijke bepalingen van de volgende richtlijnen:

- Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit (2014/30/EU)
  - Richtlijn Laagspanningsrichtlijn, (2014/35/EU)
- Richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (2012/19/EU)
- Richtlijn betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (2011/65/EU)
- Verordening Medische Hulpmiddelen (2017/745/EU)

Enschede, 03 Juni 2024

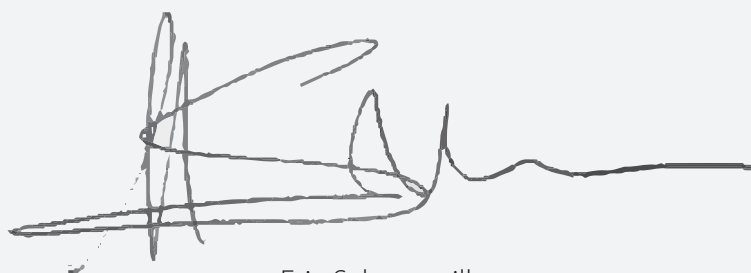

Eric Schonewille  
Algemeen Directeur / CEO

CE   UDI-DI EI MD klasse I SRN NL-MF-000041828



# Waarschuwingen

## Elektro / Bedinterface

Lees deze instructies en waarschuwingen voor gebruik goed door. Deze gaan over alle elementen van de Bedinterface van rdgKompagne.

*Gebruik de Bedinterface uitsluitend waar deze voor bedoeld is: het bedienen van het specifieke bed of de stoel waarop de Bedinterface is afgestemd. Plaats/monteer geen andere zaken dan zoals deze tijdens de uitlevering getoond zijn. Demonteer de Bedinterface niet verder dan tijdens de uitlevering getoond is. Door eigen toevoegingen en/of wijzigingen komt de aansprakelijkheid en garantie door rdgKompagne te vervallen.*

### Bevestigen

De Bedinterface wordt door rdgKompagne op de daarvoor meest geschikte plek op het bed/de stoel opgebouwd. Verwijder deze nooit zelf. Foutief verwijderen van de Bedinterface kan tot een elektrische schok leiden.

### Aansluiten

rdgKompagne sluit de Bedinterface op correcte wijze aan en stelt deze af voor het betreffende bed of de betreffende stoel. Haal nooit zelf de aansluitingen los van deze elementen. Foutief loshalen van aansluitingen kan tot een elektrische schok leiden.

### Reinigen

Voordat de Bedinterface gereinigd wordt moet deze uit het stopcontact gehaald worden. Gebruik een licht bevochtigde doek, evt. aangevuld met allesreiniger, om de delen schoon te maken. Vermijd overtollig watergebruik en het binnendringen van vocht in de elektrische delen. Dit kan leiden tot een elektrische schok. Laat de Bedinterface goed drogen alvorens deze weer in gebruik wordt genomen.

### Defecten

In geval van storingen of defecten: voer geen handelingen uit, anders dan in deze handleiding wordt getoond. Het is niet toegestaan zelf onderdelen los te halen of vervangen. Neem in het geval van storingen of defecten met betrekking tot de voeding contact op met onze helpdesk: 088-0310310 of <https://rdgkompagne.nl/helpdesk>. Voor het geval van een storing of een defect wordt er altijd een extra handset meegeleverd zodat het nog (tijdelijk) manueel bediend kan worden.

### Handset/omgevingsbediening-instructies

Raadpleeg de meegeleverde handleidingen van de handset en/of de omgevingsbediening voor instructies met betrekking tot de bediening, het onderhoud en andere zaken betreffende deze onderdelen.