



# EU-conformiteits- verklaring

## Elektro/Voeding

Wij,

Roessingh Dienstengroep B.V.  
h.o.d.n. rdgKompagne

verklaren dat geheel onder eigen verantwoordelijkheid deze Elektro Voeding (EV) in alle varianten met accessoires, waarop deze verklaring betrekking heeft, in overeenstemming is met alle toepasselijke bepalingen van de volgende richtlijnen:

- Richtlijn Elektromagnetische Compatibiliteit (2014/30/EU)
  - Richtlijn Laagspanningsrichtlijn, (2014/35/EU)
- Richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (2012/19/EU)
- Richtlijn betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (2011/65/EU)
- Verordening Medische Hulpmiddelen (2017/745/EU)

Enschede, 24 November 2025

Eric Schonewille  
Algemeen Directeur / CEO

### rdgKompagne

Josink Esweg 13  
Postbus 310  
7500 AH Enschede  
088 0310 310  
[www.rdgkompagne.nl](http://www.rdgkompagne.nl)  
[info@rdgkompagne.nl](mailto:info@rdgkompagne.nl)


**SRN** NL-MF-000041828

**UDI-DI** EV

**MD** Klasse I



Digitale versie:

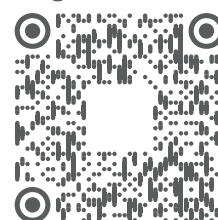

# **Waarschuwingen** Elektro/Voeding

Lees deze instructies en waarschuwingen voor gebruik goed door. Deze gaan over alle type voedingsproducten van rdgKompagne.

**Gebruik de voedingsproducten uitsluitend waar deze voor bedoeld zijn: het voorzien van de correcte spanning aan het communicatiehulpmiddel. Plaats geen andere zaken dan zoals deze tijdens de uitlevering getoond zijn. Demonteer de voedingsproducten niet verder dan tijdens de uitlevering getoond is. Door eigen toevoegingen en/of wijzigingen komt de aansprakelijkheid en garantie door rdgKompagne te vervallen.**

## Bevestigen

De voedingsproducten wordt door rdgKompagne op de daarvoor meest geschikte plek op de rolstoel opgebouwd. Verwijder of verplaats deze nooit zelf van de rolstoel. Foutief verwijderen van de voedingsdelen kan tot een elektrische schok leiden.

## Aansluiten

rdgKompagne sluit de voedingsproducten op correcte wijze aan en stelt deze indien nodig af voor het betreffende communicatiehulpmiddel. Haal nooit zelf de aansluitingen los van deze elementen. Foutief loshalen van aansluitingen kan tot een elektrische schok leiden. In geval van een oplader: sluit nooit apparaten aan in vochtige omgevingen of wanneer er vocht in (de buurt van) de lader is geweest.

## Reinigen

Voordat de voedingsproducten gereinigd worden moet het communicatiehulpmiddel verwijderd worden. Gebruik een licht bevochtigde doek, evt. aangevuld met allesreiniger, om de voedingsdelen schoon te maken. Vermijd overtollig watergebruik en het binnendringen van vocht in de elektrische delen. Dit kan leiden tot een elektrische schok.

## Defecten

In geval van storingen of defecten: voer geen handelingen uit, anders dan in deze handleiding wordt getoond. Het is niet toegestaan zelf onderdelen los te halen of vervangen. Neem in het geval van storingen of defecten met betrekking tot de voeding contact op met onze helpdesk: 088-0310310 of <https://rdgkompagne.nl/helpdesk>.

## Apparaat instructies

Raadpleeg de meegeleverde handleidingen van het apparaat voor instructies met betrekking tot de bediening, het onderhoud en andere zaken betreffende het communicatieapparaat.